



5. Kasutamine

3. Vajutage ja hoidke toitelüliti all 3 sekundit kuni seadme käivitumiseni ning seejärel võtke sörm ära.

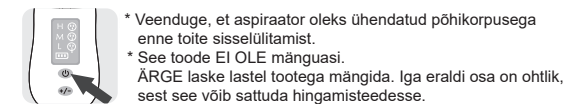

4. Vajutage sobiva imemiskiluruse saavutamiseks imemise reguleerimise nupule.

* Kui lapsel ei saa ise seadme kasutamise hakkama, siis pange laps lamama või hoidke mugavalt kinni ja kasutage sobivat imemiskilurust.

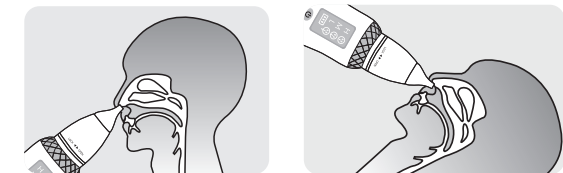

* ÄRGE asetage seadet liiga sügavale ninna. ÄRGE suruge seadme otsikut liiga kõvasti vastu ninaseina.

* ÄRGE pange seadet suhu ega silma. See aspiraator on ette nähtud ninakinnisuse leevendamiseks. ÄRGE kasutage seadet muul otstarbel, kui on ette nähtud juhendis.

* Järelejäädud osakesed tuleb eemaldada imikutele ettenähtud pintsettidega.

* Veenduge, et kasutaksite imikutele ettenähtud pintsette nende mõeldud otsikuga.

* Pintsettide otsik kaitseb nina limaskestast ja takistab liiga sügavale ninna tungimist.


* Imikutele ettenähtud pintsettide kasutamisel tarvitage kindlasti ka nende mõeldud otsikut. Ilma otsikuta pintsetid kujutavad endast võimalikku vigastuste ohtu.

5. Pärast seadme kasutamise lõpetamist lülitage toide toitelülilte vajutades välja.

7

6. Säilitamine ja hooldus

1. Võtke aspiraator lahti. Selleks eraldage aspiraator pärast kasutamist põhikorpuse küljest.

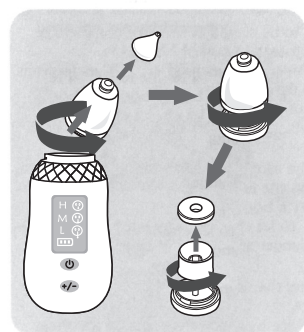

2. Visake imemisnõusse kogutud sekreet ära.




3. Steriliseerige lahtivõetud aspiraatori osi keeva veega või puhastage neid põhjalikult jooksva vee all.



4. Pärast puhastamist kuivatage põhjalikult.

* Veenduge, et seadme osad ei puutuks kokku poti kuuma sisepinnaga, kui steriliseerite neid keevas vees.

5. Pühkige põhikorpust pehme lapiga või kasutage vajaduse korral veega niisutatud lappi.

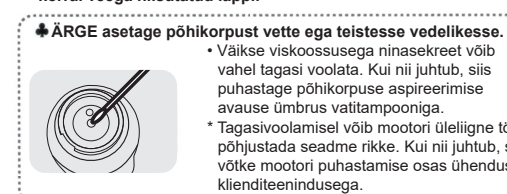

6. Säilitamine ja hooldus pärast toote kasutamist

- (1) Vältige toote säilitamist kohas, kus see võib kokku puutuda vedelikega.
- (2) Vältige säilitamisel suure niiskuse, kõrge temperatuuri ja otsese päikesevalgusega või halvasti õhutatud kohti. Toode tuleb hoida kohas, kus puudub pöurutuse või vibratsiooni oht.
- (3) Mehaanilise tõrke tekkimisel ärge võtke toodet lahti, vaid pöörduge klienditeenindusse.
- (4) Kontrollige seadme osi regulaarselt.

8

7. Mehaaniliste tõrgete kontrollnimekiri


Probleem	Põhjus	Lahendus
Kui imemine on liiga nõrk või puudub üldse	Aspiraatori patarei on tühi.	Kontrollige laadimise näidikut.
	Seade on valesti kokku pandud.	Kontrollige, kas aspiraator on õigesti kokku pandud. (vt lk 6.)
	Aspiraatori ja põhikorpuse vaheline ühendus on ebastabiilne.	Kontrollige aspiraatori ja põhikorpuse vahelist ühendust.

Toote tehnilised andmed

Toote nimetus	Elektriline nina- ja kõrvaaspiraator
Nimipinge	5 V, 1000 mA
Mass	165 g (põhikorpuse)
Pakkimisüksus	1 komplekt
Seadme otstarve	Seadet kasutatakse nina- ja kõrvasekreedi eemaldamiseks välise vaakumi abil.

9

Elektriline nina- ja kõrvaaspiraator Ohutu kasutamiseks vastündinutel ja imikutel

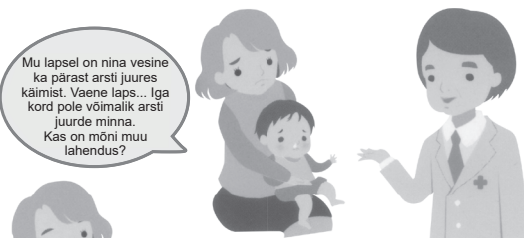

Mu lapsel on nina vesine ka pärast arsti juures käimist. Vaene laps... Iga kord pole võimalik arsti juurde minna. Kas on mõni muu lahendus?



1 Pange laps lamavas asendisse või hoidke teda kindlalt kinni.



3 Jätke hüvasti ninasekreedi ja kõrvavahaga.

Vancoon lahendab kõik teie ja teie lapse mured. Vancoon puhastab tõhusalt ja imab ka kõige sügavamatest ninakäikudest sekreeti liigse ärritusest.

2 Asetage silikoonist otsik üleni lapse ninna ja lülitage toide sisse.



Valmistatud Hiinas



Elektriline nina- ja kõrvaaspiraator Ohutu kasutamiseks vastündinutel ja imikutel

Pehme silikoonist otsikuga puhastuskomplekt ninasekreedi ja kõrvavahaga tõhusaks eemaldamiseks imikul



Ninasekreedi aspireerimine

Spetsiaalselt välja töötatud vastündinutele ja imikutele sobiva imemisrõhuga.



Märkus. Käivitamisel vajutage 3 sekundit.



Täname teid, et ostsite meie toote. Enne toote kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga, et tagada toote mugav ja ohutu kasutamine.


1. Sisukord	2
2. Ohutushoiatused	3
3. Iga osa nimetus	4
4. Ettevalmistus kasutamiseks	5
5. Kasutamine	6-7
6. Säilitamine ja hooldus	8
7. Mida kontrollida mehaanilise rikke järel	9

Enne toote kasutamist tutvuge kindlasti juhistega. See toode on heaks kiidetud kasutamiseks kasutusseadmena.

2

Ohutushoiatused

- ▶ Pidage kinni ohutushoiatustest, sest need hoiavad ära hooletusest tingitud õnnetused või ohud tänu toote õigele ja turvalisele kasutamisele.
- ▶ Ohutushoiatused koosnevad sõnadest „hoiatus“ ja „ettevaatust“, millel on järgmine tähendus.

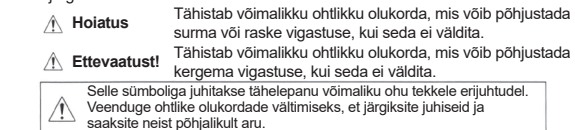

Hoiatus

- * Kui teil ilmnevad järgmised seisundid, siis pidage enne toote kasutamist nõu oma arstiga.
- Südamehaiged, kellel on halvaloomulised kasvaja ja krooniline väsimus.
- Südamehaiged, kellel on õrn või tundlik nahk või muud nahaprobleemid.
- Inimesed, kellel on psüühikahäired, ninahäired, kehas tihti tekiv turse või kõrge palavik.
- Muude füüsiliste häirete või terviseprobleemide tõttu arstliku järelevalve all olevad inimesed, kes kasutavad toodet praeguse tervisega või varem ravitud haiguskohtade ravimiseks.
- Muude nahaalade arstliku järelevalve all olevad inimesed, kellel on nina, silmade või kõrvade allergia või võimalik peatne vajadus arstiabi järele.
- * ÄRGE kasutage toodet muul otstarbel, kui on ette nähtud seadme juhendis.


Ettevaatust!

1. Veenduge, et imemisnõu ei hakkaks üle ajama. Puhastage seda pärast iga kasutuskorda.
2. Lülitage toide välja, kui eraldate aspiraatori seadme põhiosa küljest.
3. Kontrollige, kas lüüti ühendus toimib ja seade töötab tavapärastel tingimustel.
4. Olge seadme kasutamisel ettevaatlik.
 - 1) Hinnake seadme seisundit ja kontrollige, kas patsiendil ilmneb seadme kasutamisel kõrvaltoimeid.
 - 2) Kui seadme või kasutaja ohutuses ja võtke sobivad abinõud.
5. Veenduge, et enne seadme kasutamist oleksite põhjalikult tutvunud kasutusjuhendiga.
6. Olge seadme säilitamisel ettevaatlik järgmistest toimingutest.


3

3. Iga osa nimetus


1. Korpuse

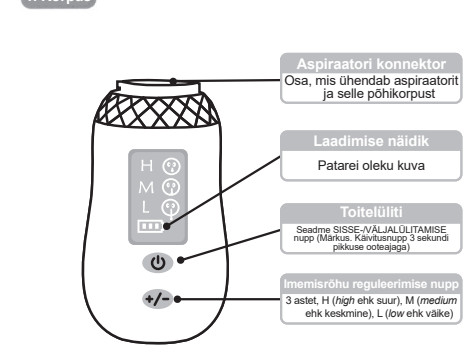

2. Aspiraator

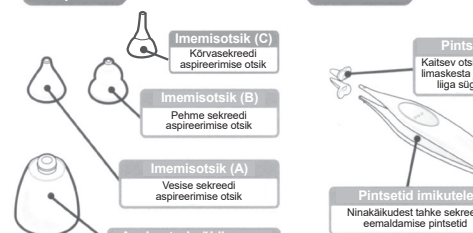


3. Pintsetid

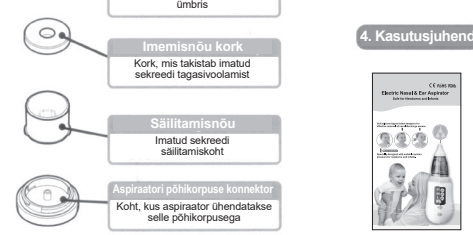

4

4. Ettevalmistus kasutamiseks


1. Pärast toote ettevaalikul pakendist eemaldamist kontrollige järgmist.
 - Kontrollige põhjalikult, ega toode pole kahjustatud.
 - Veenduge, et kõik osad oleksid olemas.
 - Võtke ühendust ostukoha või edasimüüjaga, kui avastate kahjustusi või puuduolevaid osi.
2. Enne seadme esmakordset kasutamist laadige see kõigepealt täis.
 - Laadimiseks sisestage väike pistik seadme tagaküljel paiknevasse kontakti ja ühendage teine USB-kaabli ots vooluadapteriga. (Laadimisadapter ei kuulu komplekti.)
 - Seadet laetakse, kui patarei oleku tuli liigub. Laadimiseks kulub kuni 3 tundi.
 - Seade on täis laetud, kui laadimisnäidik enam ei vilgu. Töötamisega on kuni 60 minutit.

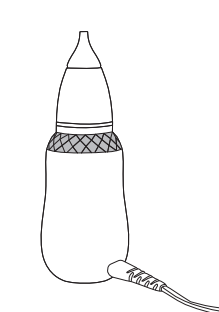

5. Kasutamine

1. Aspiraatori kokkupanekuks toimige järgmiselt.

1. Asetage imemisnõu kork nõule.
2. Asetage imemisnõu aspiraatori põhikorpuse konektorile. Pöörake nõule suunas.
3. Kinnitage aspiraatori põhikorpuse keeramisega kindlalt paika.
4. Pange imemisotsik aspiraatori põhikorpusele.

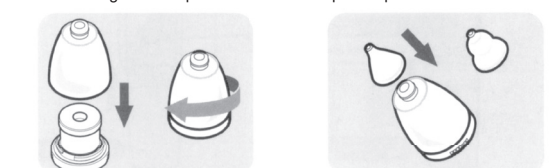

2. Asetage aspiraator põhikorpusesse.

- Asetage üleni kokkupandud aspiraator põhikorpuse küljes asuval konektorile nii, et sälgud oleksid kohakuti.
- Pöörake nõule suunas.

Valige lapse nina suuruse ja kujuga sobiv otsik. Samal ajal tuleb arvestada lapse ninakinnisuse astet.

- Imemisotsik (A):** vesise sekreedi aspireerimise otsik
- Imemisotsik (B):** pehme sekreedi aspireerimise otsik
- Imemisotsik (C):** kõrvasekreedi aspireerimise otsik



6